

Peristeen® Plus

Komplett rendszer ballonos
katéterrel transzanális
irrigációhoz

Kérjük, hogy a transzanális irrigációra szolgáló Peristeen Plus komplett rendszer első használata előtt teljes egészében olvassa át jelen használati utasítást.



Használati utasítás

 Coloplast

Termékleírás

A ballonos katéterrel ellátott Peristeen® Plus egy vízbázisú, transzanális irrigációra szolgáló, a bél kiürítését segítő komplett rendszer. A bél kiöblítése a ballonos katéter segítségével a végbélen keresztül bevezetett vízzel történik. Mindeközben a páciens a WC-n ül. A víz bélben tartása érdekében a végbélben tömítést képező ballonos katéter két méretben kapható: **Normál** és **Kicsi**.

Miután a bélnek a javasolt vízmennyiséggel történő átöblítése megtörtént, a víz és a széklet a WC-be ürül.



Termékkomponensek

(A komponensekhez tartozó számokat lásd még:
bal oldali ábra)

1 Csavaros kupak a szabályozóegység és a víztasak
összekapcsolására szolgáló zárral

2 Hőmérsékletjelzővel ellátott víztasak

3 Szabályozóegység

3a A ballon felfújására és a víz pumpálására
szolgáló pumpa

3b Levegő- és vízsabályozó gomb

4 Csövek

5 Bevont rektális ballonos katéter

6 2 db rögzítőszalag a rendszer használat közbeni
rögzítéséhez

7 Piperetáska a rendszer tárolásához*

* Nem minden rendszerhez kapható

Eltarthatóság és csere

Maximálisan megengedett újbóli felhasználások:

Csere 90 használat után

Csere 15 használat után

Csere 90 használat után

Csere 90 használat után

Egyszer használatos

Csere a rugalmasság csökkenése esetén

Rendeltetés

A termék rendeltetése a colon (vastagbél) és a colon descendens (leszálló vastagbél) kiürítésének elősegítése.

Javallatok

A Peristeen alkalmazása a székletinkontinenciában vagy krónikus székrekedésben szenvedő és/vagy megnövekedett székletürítési időt mutató páciensek esetében javasolt.

A termék felnőtt nők és férfiak, valamint 3 év feletti gyermekek által egyaránt használható.

Ellenjavallatok

A Peristeen® Plus transzanális irrigáció alkalmazása az alábbi esetekben **nem** javasolt, mivel a mechanikus lezárás vagy a vastagbéliszövetnek az alábbiakban felsorolt okok miatt bekövetkező gyengülése fokozná a bélperforáció, a trauma vagy a vérzés kockázatát:

- **Ismert anális vagy colorectalis stenosis**
- **Colorectalis carcinoma (aktív/visszatérő)**
- **anális vagy colorectalis operációt követő 3 hónapon belül**
- **endoszkópos polypectomiát követő 4 héten belül**
- **Ischaemiás colitis**
- **akut IBD (krónikus gyulladós bélbetegség)**
- **akut diverticulitis**

Mivel a lista nem teljes, ezért az orvosnak/egészségügyi szakembernek minden esetben mérlegelnie kell az egyes betegek egyedi tényezőit is.

Figyelmeztetések

A Peristeen® Plus transzanális irrigációs eljárást mindig körültekintően kell végezni. Győződjön meg róla, hogy a csomagoláson feltüntetett katéterméret (Normál vagy Kicsi) megegyezik az egészségügyi szakember által javasolt katétermérettel. A ballonos katéter bevezetése során ne alkalmazzon erőszakot. A bélperforáció a transzanális irrigáció során rendkívül ritkán jelentkező, azonban komoly és adott esetben akár halálos kimenetelű komplikáció, amely azonnali kórházi ellátást és gyakran műtéti beavatkozást igényel.

Azonnal forduljon orvoshoz, ha a kezelés alatt vagy a Peristeen Plus transzanális irrigációt követően az alábbi panaszok valamelyikét vagy azok közül többet is tapasztal:

- **Erős vagy tartós hasi- vagy hátfájdalom, különösen, ha ahhoz láz is társul**
- **Erős vagy tartós anális vérzés**

A bevont ballonos katéter újbóli felhasználását és/vagy mosását vagy fertőtlenítését nem javasoljuk, mivel az negatívan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, ezáltal tovább növelve a bélperforáció kockázatát.

A transzanális irrigációra szolgáló Peristeen Plus komplett rendszert tartsa távol kisgyermekektől és ügyeljen a rendszer használata közben esetlegesen jelen lévő gyermekekre, ezáltal csökkentve a csövek/rögzítőszalagok okozta fojtás vagy a termékről esetlegesen leváló apró alkatrészek okozta fulladás kockázatát.

Óvintézkedések

Már meglévő vagy tervezett terhesség esetén nem javasoljuk a Peristeen® Plus transzanális irrigáció alkalmazását, mivel a páciensek ezen csoportja esetében még nem vizsgálták a termék használatát.

A páciensekre vonatkozó speciális figyelmeztetések

Az Ön biztonsága érdekében létfontosságú, hogy a Peristeen Plus-szal végzett irrigáció előtt konzultáljon egy, a transzanális irrigációs eljárás alkalmazásában jártas orvossal/egészségügyi szakemberrel.

A termék használata előtt egy egészségügyi szakember által nyújtott alapos útmutatás szükséges.

Az első alkalommal végzett irrigációt egészségügyi szakembernek kell felügyelnie.

Az egészségügyi szakemberekre vonatkozó speciális figyelmeztetések

A Peristeen® Plus-szal végzett első irrigáció előtt az esetleges ellenjavallatok, figyelmeztetések vagy óvintézkedések kivizsgálása érdekében a páciens kórtörténetének beható vizsgálata, valamint digitális rektális vizsgálat elvégzése szükséges.

A gyenge bélanatómiával (például korábbi anális vagy colorectalis operáció, medenceterületi operáció és/ vagy sugárterápia miatt) rendelkező páciensek kiértékelése a transznanális irrigációra szolgáló Peristeen Plus használatában jártas orvos kötelessége. Annak meghatározásához, hogy a páciens bele alkalmas-e a Peristeen Plus-szal végzett irrigációra és hogy a ballon felfújása milyen mértékben lehetséges (ha egyáltalán), endoszkópia, defekográfia vagy hasonló eljárás elvégzése szükséges.

Az ellenjavallatokon és figyelmeztetéseken kívül különösen figyelembe kell venni a páciens alábbi korábbi vagy aktuálisan fennálló panaszait is:

- Bármilyen anorectalis állapot, amely fájdalomhoz vagy vérzéshez vezethet, mint például anális fissura, anális fistula vagy harmad- vagy negyedfokú aranyeres csomók
- Kemény széklet/súlyos székrekedés. Amennyiben a páciens súlyos székrekedésben (kemény széklet) szenved, úgy a Peristeen Plus-szal végzett transznanális irrigáció megkezdése előtt először szükséges a bél kiürítése
- Hasi- vagy medenceterületen végzett sugárterápia
- Súlyos diverticulitis (a diverticulum gyulladása) vagy diverticularis abscessus
- Korábbi anális vagy colorectalis operáció
- Korábbi komoly medenceterületi operáció
- Súlyos autonóm dysreflexia
- Hosszan tartó kortikoszteroidos kezelés
- Haemorrhagias diathesis vagy antikoagulánsokkal való kezelés (az Aspirin vagy Clopidogrel kivételével)
- Megváltozott székelés, mint például ismeretlen ok által kiváltott hirtelen hasmenés. Ebben az esetben azonosítani kell a hasmenés kiváltó okát.
- Rectalis gyógyszerek, mivel a transznanális irrigáció csökkentheti e gyógyszerek hatását

A páciens számára megfelelő, a Peristeen Plus-szal végzett irrigációs eljáráshoz alkalmas katéter- és ballonméret kiválasztása a Peristeen Plus transznanális irrigáció alkalmazásában jártas egészségügyi szakember kötelessége.

E termék használata előtt egy egészségügyi szakembernek alapos útmutatásban kell részesítenie a páciens.

Az első irrigáció alkalmával egy egészségügyi szakembernek kell felügyelnie a páciens.

Információk

- A transznanális irrigációra szolgáló Peristeen® Plus komplett rendszer higiéniai okokból kizárólag egy személy által használható.
- A termék gyártása során nem használtunk természetes kaucsuk latexet, azonban a gyártási vagy csomagolási folyamat során egyes esetekben nyomokban előfordulhat a természetes kaucsuk latex-szel való szennyeződés.
- A víztasakon feltüntetett mennyiségjelző kizárólag a vízmennyiség jelzésére szolgál.
- A víztasakon található vízhőmérsékletjelző tájékoztatási célt szolgál.
- Ez a termék ftalátokat tartalmaz, ezért annak használata gyermekek és terhes vagy szoptató nők számára kizárólag egészségügyi szakemberrel történt egyeztetést követően lehetséges.
- A terméknek a Coloplast aktuális javaslataitól eltérő egyéb használatából eredő sérülésekért vagy károkért a Coloplast semmilyen felelősséget nem vállal.

Speciális tárolási feltételek


Az irrigáció utáni száradást követően a terméket szobahőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve, leginkább a piperetáskában tárolja. Győződjön meg róla, hogy a csövek nincsenek megtörve és hogy a rendszer, valamint annak egyetlen eleme sem érintkezik éles vagy hegyes tárgyakkal.

Egészségügyi szakemberek részére

Az irrigációhoz szükséges vízmennyiség páciensenként eltérő. Felnőttek esetében általában 300-1000 ml elegendő. Gyermekek esetében a javasolt mennyiség 10-20 ml a testmagasság alapján számított ideális testsúlykilogrammonként.

A Peristeen Plus-szal végzett transznanális irrigációval kapcsolatos további információkért és tájékoztató anyagokért látogasson el a www.coloplast.de weboldalra, ahol a megtalálja a kapcsolattartási információkat.

A szabályozóegység leírása

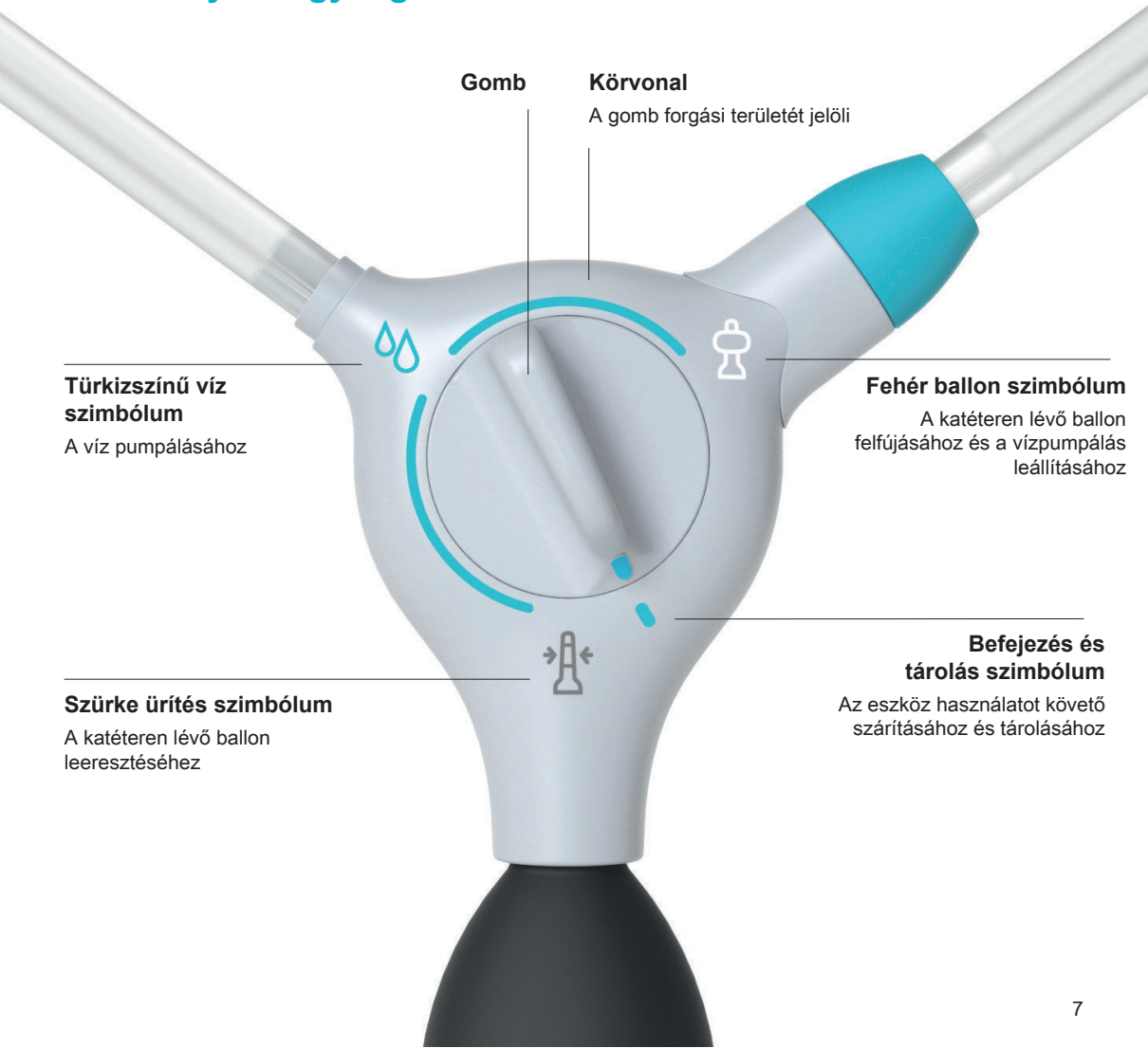

Gomb

Körvonal

A gomb forgási területét jelöli

Türkizszínű víz szimbólum

A víz pumpálásához

Fehér ballon szimbólum

A katéteren lévő ballon felfújásához és a vízpumpálás leállításához

Szürke ürítés szimbólum


A katéteren lévő ballon leeresztéséhez

Befejezés és tárolás szimbólum

Az eszköz használatot követő szárításához és tárolásához

Használati utasítások

Az irrigáció megkönnyítése érdekében használat előtt ürítse ki a hólyagját.

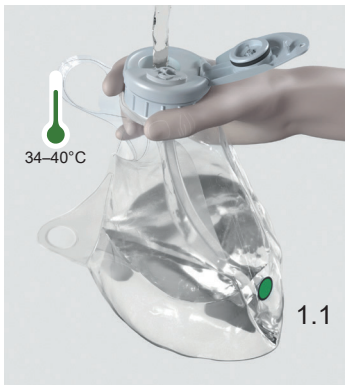

1. Teljesen töltsse fel a víztasakot

A víztasak kinyitásához nyissa fel a zárat. Tiszta csapvízzel vagy palackos vízzel töltsse tele a víztasakot. A szabályszerű működés és annak érdekében, hogy megálljon a talajon, a tasakot teljesen fel kell tölteni. Ezután egy pattintással zárja vissza a zárat. **Megjegyzés:** Ne adjon a vízhez semmilyen adalékanyagot.

Víz hőmérséklet

A víznek langyosnak kell lennie (34-40°C); a túl forró víz károsíthatja az érzékeny bélnyálkahártyát, a túl hideg víz pedig hasi görcsöket okozhat.

A megfelelő víz hőmérsékleti tartomány eléréséhez figyelje a víztasak elülső oldalán található kerek hőmérsékletjelzőt (1.1).



Túl
hideg




Irrigációhoz
alkalmas



Túl forró


Az irrigációt akkor végezze el, amikor a kijelző zöld. Amennyiben kétségei vannak vagy nem tudja megkülönböztetni a színeket, úgy engedje a vizet a csuklójára, hogy érezze, hogy az langyos-e.

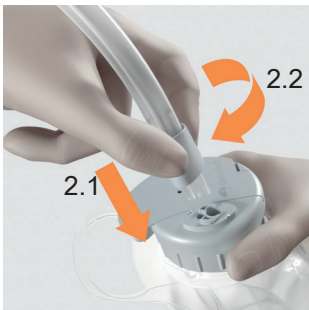

2. Csatlakoztassa a csövet a víztasakhoz

A csövet annak szürke csatlakozóval ellátott végével csatlakoztassa a szürke csavaros kupakhoz; a nagy csőnyílást a nagy nyíláshoz, a kis csőnyílást pedig a kis nyíláshoz igazítsa.

Tolja össze az elemeket (2.1), majd a csatlakozót kattánásági forgassa óramutató járásával megegyező irányba (2.2). A víztasakot elérhető távolságban helyezze a talajra.

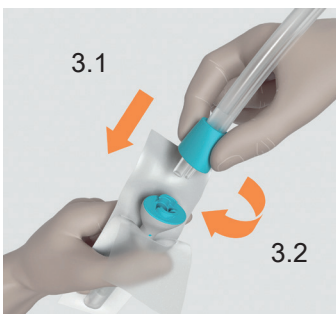

3. A ballonos katéter csatlakoztatása

A türkiz színű csatlakozóval ellátott cső egyik végét rögzítse a szabályozóegységen; a nagy csőnyílást a nagy lyukhoz, a kis csőnyílást pedig a kis lyukhoz igazítsa.

A csatlakozót kattánásig forgassa óramutató járásával megegyező irányba. A csomagoláson ellenőrizze a katéter felhasználhatóságának dátumát.

A katéter csomagolását a katéteren található türkiz színű pontig nyissa fel.

A cső másik végét rögzítse a ballonos katéteren található türkiz színű csatlakozóhoz (3.1).

A csatlakozót kattánásig forgassa óramutató járásával megegyező irányba (3.2).

Még ne fújja fel a ballont.

Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a csomagoláson feltüntetett katéterméret (Normál vagy Kicsi) megegyezik az egészségügyi szakember által javasolt katétermérettel.




4. A ballonos katéter előkészítése


A ragasztópontok segítségével rögzítse a katétert egy falra vagy a csomagolásában helyezze egy pohárba vagy egy üvegbe.

5. A szabályozóegység rögzítése (opcionális)


A pumpálás közbeni további stabilitás biztosítása érdekében a szabályozóegységet a rögzítőszalag segítségével a combján is elhelyezheti.

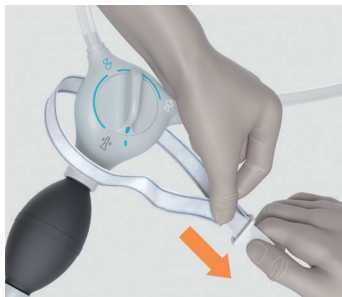


Hurkolja a rögzítőszalagot a pumpa alja köré.

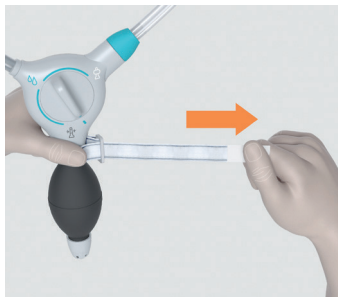


Tolja át a rögzítőszalagot a hurkon, majd szorosan húzza meg.

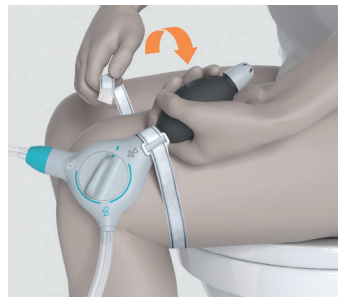


Rögzítse a pumpát a combján és addig igazítsa a rögzítőszalagon, amíg az kényelmes lesz.

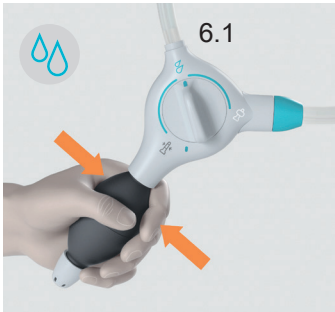

6. A ballonos katéter aktiválása vízben

(6.1) Forgassa a gombot a **türkiz színű víz szimbólumra** .

A katéterbevonat aktiválásához addig pumpálja óvatosan, amíg a katéter csomagolása megtelik vízzel.

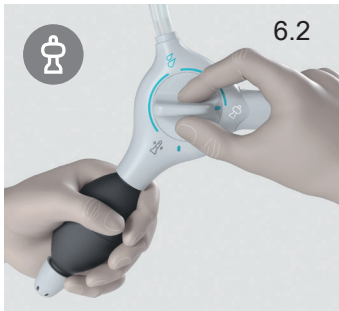

(6.2) A víz pumpálásának leállításához forgassa a gombot a **fehér ballon szimbólumra** .

Várjon 30 másodpercet.

Távolítsa el az aktivált katétert a csomagolásból, majd 2 percen belül használja fel azt.

Megjegyzés: Ne használjon semmilyen egyéb síkosító anyagot a ballonos katéteren, mivel az károsíthatja a ballont.




7. A ballonos katéter bevezetése

A ballonos katétert az ujjával fogja meg a türkiz színű pont alatt.

Az egészségügyi szakember utasításai szerint óvatosan vezesse be a ballonos katétert a végbélbe úgy, hogy az azt tartó ujjai a testén kívül maradjanak.

Figyelem:

A ballonos katéter bevezetése során ne alkalmazzon erőszakot.

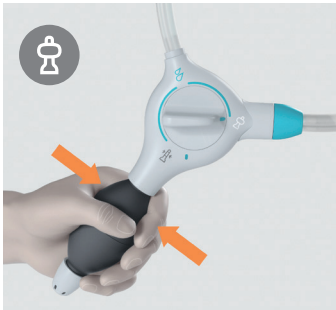


8. A ballon felpumpálása

Ballonméret


Az egészségügyi szakember megtanítja Önnek, hogy mennyire kell felpumpálni a ballont. Azt javasoljuk, hogy a ballont olyan mértékben pumpálja fel, amennyire azt az irrigáció közbeni szivárgások elkerülése érdekében szükségesnek tartja.


Normál méretű katéter esetén általában egy-három teljes pumpálás elegendő a szivárgások elkerülése érdekében. A ballon kipukkadásának elkerülése érdekében ne lépje túl a maximális, négy teljes pumpálási mennyiséget.

Kicsi méretű katéter esetén rendszerint egy teljes pumpálás elegendő a szivárgások elkerülése érdekében. A ballon kipukkadásának elkerülése érdekében ne lépje túl a maximális, két teljes pumpálási mennyiséget.

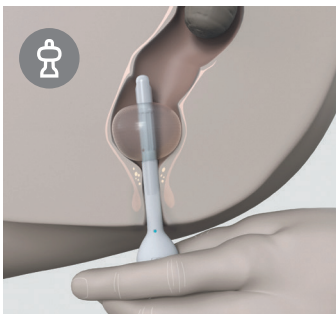


A ballon felpumpálása

A ballon felpumpálásához forgassa a gombot a **fehér ballon szimbólumra** . A végbél lezárásához óvatosan húzza vissza a katétert.

Amennyiben úgy érzi, hogy a ballon túl nagy lett, úgy forgassa a gombot a **szürke ürités szimbólumra**  a levegő ballonból történő kiengedéséhez.



Amennyiben problémái adódnak, forduljon az egészségügyi szakemberhez.

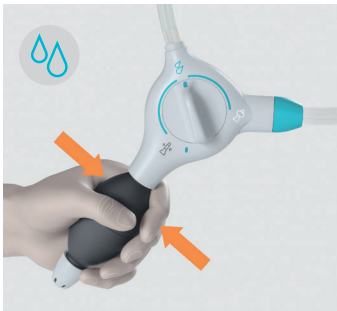Megjegyzés: Egy teljes pumpáláshoz teljesen nyomja össze a pumpát, amíg annak belső falai egymáshoz érnek.





9. A víz pumpálása

Óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a gombot a körvonal mentén következő **türkiz színű víz szimbólumra**

 . Ügyeljen rá, hogy ne a szürke ürítés szimbólumon  keresztül forgassa el a gombot, mert azzal kiüríti a ballont.


Lassan pumpálja a vizet a bélbe, amíg eléri a szükséges vízmennyiséget. A szükséges vízmennyiséget illetően az egészségügyi szakember ad felvilágosítást.



Megjegyzés: Amennyiben a ballonba több levegő szükséges, úgy a gombot óramutató járásával megegyező irányban forgassa a **fehér ballon szimbólumra**  és végezzen még egy pumpálást.


Ezután forgassa vissza a gombot a **türkiz színű víz szimbólumra**  és folytassa az irrigációt.

Irrigáció közbeni fájdalom vagy rosszullét


Ha a víz pumpálása túl gyorsan történik vagy a víz nem langyos (34-40°C), akkor annak következtében fájdalom és rosszullét jelentkezhet.

A víz pumpálásának leállításához forgassa a gombot a **fehér ballon szimbólumra**  és várja meg, amíg a fájdalom vagy a rosszullét érzése elmúlik.


Amikor folytatni szeretné, forgassa vissza a gombot a **türkiz színű víz szimbólumra**  és folytassa a pumpálást. Amennyiben továbbra is fájdalmat vagy rosszullétet tapasztal, úgy forgassa a gombot a **szürke ürítés szimbólumra** , majd távolítsa el a katétert és haladéktalanul értesítse az egészségügyi szakembert.

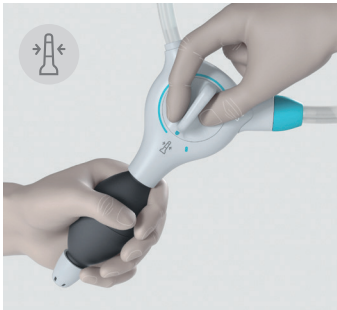

10. A katéter eltávolítása és hulladékként való elhelyezése

A javasolt vízmennyiség bejuttatását követően óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a gombot a **szürke ürítés szimbólumra**  a levegő ballonból történő kiengedéséhez.

Ha a ballonos katéter teljes kiürítése megtörtént, óvatosan távolítsa el azt a végbélből.

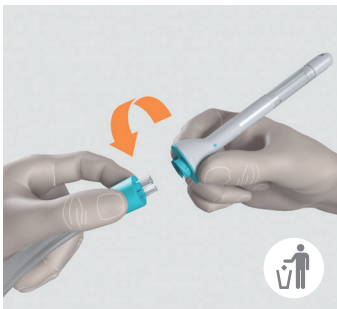

Nyissa ki a ballonos katétert, majd a helyi irányelveknek megfelelően helyezze el hulladékként pl. a normál háztartási szemétben.

Ne dobja a WC-be.

Ha a szabályozóegység a combjára volt rögzítve, úgy azt most már leveheti.

Maradjon a WC-n ülve.



11. A bél kiürítése

A bél kiürülése hamarosan megkezdődik. Amennyiben semmi sem történik, úgy az ürítési folyamat beindításához próbáljon meg nyomni, köhögni, masszírozza a hasát vagy mozgassa a felsőtestét.

A bél ürítési ideje egyénenként eltérő, de átlagosan 30 percig tart.




12. A rendszer kiürítése és szárítása

Válassza le a csatlakozót a vízszak zárjáról.

A vízszak kinyitásához nyissa fel a zárat és öntse ki a megmaradt vizet.

Tartsa nyitva a zárat és hagyja a vízszakot legalább 1 órán át fejjel lefelé száradni.

A rendszer többi részét is ürítse ki, mégpedig úgy, hogy a szabályozóegységet a hozzá csatlakoztatott csövekkel együtt a helyezze a mosdókagyló felé, majd forgassa a gombot **befejezés és tárolás szimbólumra** .



A szabályozóegységet a csövekkel együtt fejjel lefelé akassza fel (pl. egy gumisalaggal) és legalább 1 órán át hagyja száradni.

Ezt követően valamennyi komponenst szobahőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve, pl. a piperetáskában tárolja. Győződjön meg róla, hogy a csövek nincsenek megtörve és hogy a rendszer, valamint annak egyetlen eleme sem érintkezik éles vagy hegyes tárgyakkal.

13. A rendszer tisztítása

Az egyszer használatos ballonos katéter kivételével szükség esetén valamennyi komponens enyhén szappanos vízzel tisztítható. A rögzítőszalag mosógépben 60°C-on mosható és felakasztva szárítható.


A külső felületek tisztítása előtt nem szükséges szétszerelni a rendszert.

A rendszer tisztítása közben a ballonos katéter nem lehet csatlakoztatva. A komponensek belső felületei az alábbi eljárások szerint tisztíthatók:

A.

A víztasak kinyitásához nyissa fel a zárat és enyhén szappanos vízzel töltsse fel azt.

Ezután egy pattintással zárja vissza a zárat.

Forgassa a gombot a **türkiz színű víz szimbólumra**  és a vizet a csöveken keresztül pumpálja a mosdókagylóba, amíg a víztasak kiürül.

B.


A szappanmaradványok eltávolítása érdekében ezt a folyamatot még kétszer ismétlje meg tiszta csapvízzel.

Válassza le a csatlakozót a kupakról, majd kövesse „A rendszer kiürítése és szárítása” c. 12. szakaszban leírt szárítási eljárást.

A türkiz színű csatlakozóval ellátott cső szennyeződés esetén cserélhető.

A víztasak cseréje

A víztasakot 15 használat után cserélje ki. A víztasak cseréje esetén őrizze meg a csavaros zárat (kupak), mivel új kupak csak komplett rendszerrel együtt kapható.

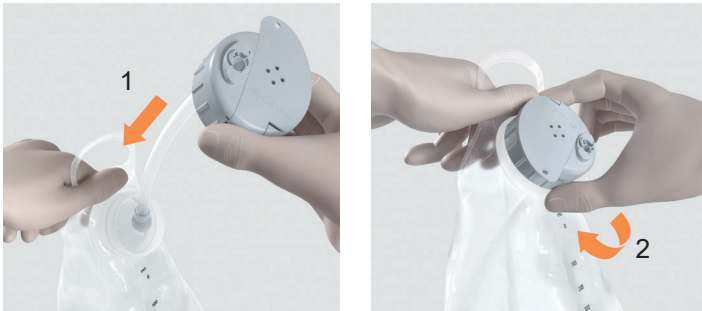

Helyezze az elszívó vezetékét a víztasakba (1), illessze egymáshoz a csavaros kupakot és a víztasak felső részét, majd a csavaros kupakot óramutató járásával megegyező irányba forgatva szorosan húzza meg azt (2), hogy irrigáció közben ne távozhasson belőle levegő.

Rendkívüli események jelentése

Amennyiben a rendszer használata közben ill. következtében egy feltehetően súlyos esemény következett be, úgy azt a gyártónak és az illetékes nemzeti hatóságnak is jelezni kell.

A pácienssel kapcsolatos információk és megjegyzések

Peristeen® Plus ballonos katéterrel

A rendszer használatának kezdete: _____ A víztasak használatának kezdete: 1 _____ 2 _____ 3 _____
90 használat 15 használat

4 _____ 5 _____ 6 _____

A rendszer LOT-száma: _____

(a csomagoláson található)

Egészségügyi szakemberek által tett kezelési javaslatok

Az irrigáció ritmusa: _____ Irrigáció napja és időpontja: _____

Katéterméret Kicsi Normál

Az irrigációhoz javasolt vízmennyiség: _____ ml.

Javasolt pumpálásmennyiség (ballon) _____ Maximális pumpálásmennyiség _____










Az egészségügyi szakember kapcsolattartási adatai:
következő időpont: _____

Az egészségügyi szakemberrel megbeszél

Jelentkezés a Coloplast® Care programba Igen Nem

A transzanális irrigációra szolgáló Peristeen Plus-szal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.coloplast.de weboldalra

Cikkszámok

Katalógusszámok	Leírás	Szimbólum	Tartalom
29140	Peristeen Plus rendszer Normál (piperetáskával)		1 szabályozóegység 2 ballonos katéter Normál 1 víztasak (csavaros kupakkal) 2 rögzítőszalag (1 csomag) 1 cső 1 piperetáska
29141	Peristeen Plus rendszer Normál		1 szabályozóegység 2 ballonos katéter Normál 1 víztasak (csavaros kupakkal) 2 rögzítőszalag (1 csomag) 1 cső
29143	Peristeen Plus ballonos katéter Normál		Ballonos katéter Normál (15/10 db, országonként)
29147	Peristeen Plus rendszer Kicsi (piperetáskával)		1 szabályozóegység 2 ballonos katéter Kicsi 1 víztasak (csavaros kupakkal) 2 rögzítőszalag (1 csomag) 1 cső 1 piperetáska
29148	Peristeen Plus rendszer Kicsi		1 szabályozóegység 2 ballonos katéter Kicsi 1 víztasak (csavaros kupakkal) 2 rögzítőszalag (1 csomag) 1 cső
29150	Peristeen Plus ballonos katéter Kicsi		Ballonos katéter Kicsi (15/10 db, országonként)
291441	Peristeen Plus víztasak		1 víztasak (csavaros kupak nélkül)
29145	Peristeen Plus rögzítőszalag		10 db, egyenként 2 rögzítőszalagot tartalmazó szett
29146	Peristeen Plus cső		2 db, türkiz színű csatlakozóval ellátott cső

Szimbólummagyarázat



Orvostechnikai eszköz



Tartás be az orvostechnikai eszközökre vonatkozó európai rendelkezéseket



Cikkszám



Lejáratási idő (ÉÉÉÉ-HH-NN)



Gyártási tételek szám / LOT-szám



Gyártási idő (ÉÉÉÉ-HH-NN)



Gyártó



Tartsa be a használati utasítást



Kizárólag egyszeri használatra



Egyetlen páciens - többszöri használat

Természetes kaucsuk latex nélküli gyártva



Egyedi eszközazonosítási rendszere utal



(Global Trade Item Number)
Globális cikkszám



Napfénytől védendő



Újrahasznosítható csomagolás



60°C/140°F hőmérsékleten mosható termék.



23340779 Verzió: 3

A Coloplast logó a Coloplast A/S bejegyzett márkája.
Minden jog fenntartva.© 2021-12-20

