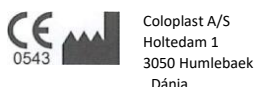


## végbéltampon

**Használati útmutató**

23314461 1. kiadás

A Coloplast-logó a Coloplast A/S lajstromozott védjegye. Minden jog fenntartva. © [2013-03]

Magyarországon forgalomba hozza a Replant Med Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

06 (1) 374-9080

www.replantmed.hu

**Javallat**

A Peristeen végbéltampon hatékony gátat képez a végbélben a széklet feltartóztatására.

**Ellenjavallat**

Ne alkalmazza a Peristeen végbéltampon az alábbi állapotok esetén:

- aranyér (3. és 4. stádiumú)
- végbélszűkület

**Leírás**

A Peristeen végbéltampon puha, kényelmes érzetű, légáteresztő poliuretán habszivacsból készült. A tampon vizben oldódó polivinil-alkohol filmréteg tartja összenyomott állapotban, amely a végbél hőjétől és nedvességétől feloldódik. A tampon ekkor kitágulva felveszi teljes méretét, így hatékony gátat képez a széklet feltartóztatására.

A Coloplast mindennemű felelősséget kizár a termék Coloplast által adott jelen ajánlásaitól eltérő módon való használatából eredő sérülésekért vagy károkért. Szokványosan érzékeny végbéltraktus esetén szükséges némi idő a végbéltampon használatának megszokásához. Csökkent vagy hiányos érzékenység esetén erre nincs szükség.

A székletnek szilárdnak és darabosnak kell lennie.

A végbéltampon két méretben kapható. Csak használat útján határozható meg, melyik méret a megfelelő. Próbálja ki mindkét méretet, és válassza ki, melyik a hatékonyabb.

A végbéltampon néhány rendszeres felhasználója azt jelezte, hogy a tampon időről időre kicsúszik a végbélből. E reakcióra nincs egyértelmű magyarázat, de a tapasztalatok alapján az érintett felhasználó újra sikeresen tudja alkalmazni a tampon, miután rövid ideig szünetelteti a használatát.

**Figyelmeztetés**

A terméket csak orvosi utasításra alkalmazza.

A Peristeen végbéltampon első alkalommal való használata előtt keressen fel egy egészségügyi szakembert, mivel használata csak szakavatott segítséggel sajátítható el.

Ne alkalmazza a tampon hasmenés esetén.

Ha a Peristeen végbéltampon a szájüregbe kerül, kitágulva fulladást okozhat.

Erős székelési inger esetén távolítsa el a végbéltampon. Amennyiben a végbéltraktus érzéketlen, így nem érez székelési ingert sem, a tampon rendszeresen cserélje az ajánlások szerint.

A Peristeen végbéltampon legkésőbb 12 óra használat után távolítsa el. Amennyiben a Peristeen végbéltampon eltávolítása során problémája akad, keresse fel kezelőorvosát.

Amennyiben a Peristeen végbéltampon használata során többször is kellemetlen érzést tapasztal, hagyja abba használatát és beszéljen kezelőorvosával.

Gyermekektől elzárva tartandó.

**Vigyázat!**

A tampon egyszer használatos termék, amelynek ismételt felhasználása veszélyes lehet a felhasználóra. Felújítása, tisztítása, fertőtlenítése és újratesterilizálása megváltoztathatja a termék tulajdonságait, növelve a felhasználót érő fizikai sérülés vagy fertőzés veszélyét.

**Használat lépései****Alkalmazási területek**

A Peristeen végbéltampon székletinkontinencia és önkéntelen bélgázürítés esetén alkalmazható. Hatékonyan képes feltartóztatni a székletet a végbélben.

**1. Előkészítés**

Kenjen egy keveset a termékhez mellékelt zseléből a Peristeen végbéltampon hegyére. Használhat ehelyett más, belsőleg (testen belül) alkalmazható síkosító zselét is. Ne távolítsa el a tampon összenyomó filmréteget.

**2. Felhelyezés**

Óvatosan tolja a Peristeen végbéltampon a végbélbe, úgy, mint egy kúpot. A Peristeen végbéltampon teljes hosszában tolja a végbélbe, közvetlenül a záróizom mögé. A húzószínórnak láthatóan kell maradnia.

**3. Használat**

Miután a Peristeen végbéltampon megfelelően felhelyezte a végbélbe, a filmréteg a végbél hőjétől és nedvességétől feloldódik, így a tampon hamarosan kitágul és felveszi teljes méretét. A végbéltampon legfeljebb 12 óráig maradhat a végbélben.

**4. Eltávolítás**

A Peristeen végbéltampon a húzószínórt óvatosan meghúzva távolíthatja el. A végbéltampon eltávolítása nem vált ki ürítési ingert. Nem kell tehát sietnie. Az új Peristeen végbéltampon azonnal felhelyezheti az elhasznált tampon eltávolítása és kiadós székletürítés után.



Az elhasznált Peristeen végbéltampon szemetgyűjtőbe, NE a vécébe dobja.

**Figyelem:** A Peristeen végbéltampon legkésőbb 12 óra használat után el kell távolítani. Amennyiben a Peristeen végbéltampon eltávolítása során problémája akad, haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát